



クッション

☆と☆が重なるように丸める



クッション

★と★が重なるように丸める



ヘッドバンド

©HISAGO Co., Ltd. FUJiPLA

○
ゴム穴

ヘッドバンド

○
ゴム穴

中心

クッション
貼り付け位置

クッション
貼り付け位置



ラミネーター
挿入方向

この部分はラミネートする前に
切り抜いてください。


----- カット線

FUJiPLA 抗菌ラミネートフィルムでフェイスシールドを作ろう！

- 【用意するもの】**
- CPリーフ抗菌加工タイプ A3 100 μ m (品番:CPK1030342)
 - A3用紙
 - はさみまたはカッター
 - セロハンテープ
 - 輪ゴム
 - 穴あけパンチ




1 //の部分を切り抜く。
抗菌ラミネートフィルムに
用紙を挟み、ラミネートする。

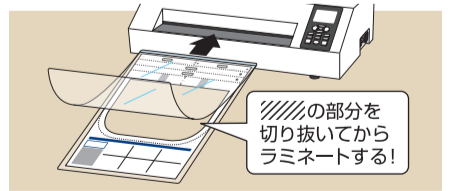


2 カット線に沿って
切り取る。


- 5つの部品ができます。
- クッション：2個
 - ヘッドバンド：2個
 - シールド面：1個

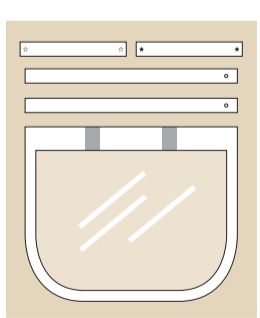


3 ヘッドバンドにゴム穴をあけ、
ゴムを通す。

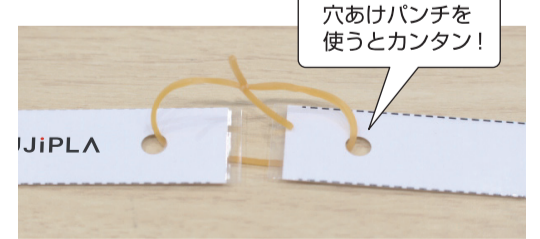


4 装着する頭のサイズに合わせて
ヘッドバンドの長さを決め
テープで固定する。

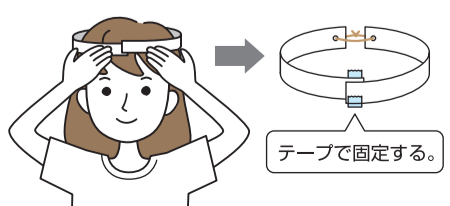

5 ヘッドバンドを、シールド面の
上辺に合わせてテープで貼り付ける。

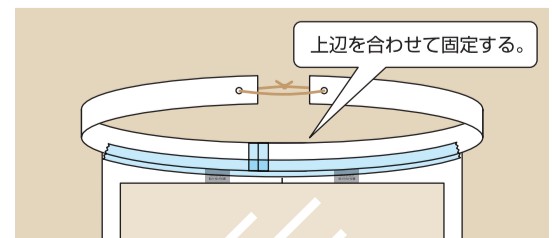

6 クッションを丸めて、クッション貼り
付け位置にテープでとめる。

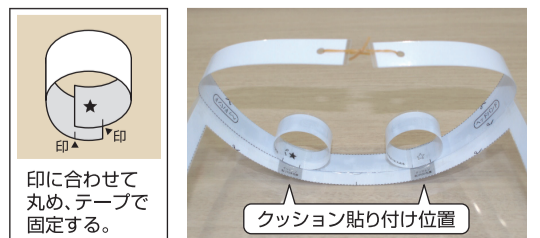

用紙やフィルムの端で手などを切らないようご注意ください。

©HISAGO Co., Ltd.

FUJiPLA